

## Ablauf einer Bestellung für orthopädische Maßeinlagen:

Sie bestellen Ihre gewünschten Einlagen online. Nach Eingang Ihrer Zahlung senden wir Ihnen ein Paket mit dem Trittschaum, einem weißen Blatt Papier und einem Retourenschein. Sie erhalten per Email eine Versandbestätigung.




Nach Erhalt des Trittschaums stellen Sie sich mit nackten Füßen vor den geöffneten Trittschaum-Karton und treten nacheinander mit beiden Füßen in den Schaum. Sie sollten am Schluss mit Ihrem vollen Gewicht in dem Trittschaum stehen und darauf achten, dass auch die Zehen vollständig in den Schaum eindrücken (wenn erforderlich, mit den Fingern etwas nachdrücken).



Nehmen Sie (am besten die originale, eingeklebte) Schuheinlage aus Ihrem Schuh und legen Sie diese auf das mitgelieferte weiße Blatt Papier.



Nun zeichnen Sie die Einlage mit einem gut sichtbaren Stift nach, so dass wir die Einlage exakt Ihrem Schuh anpassen können.

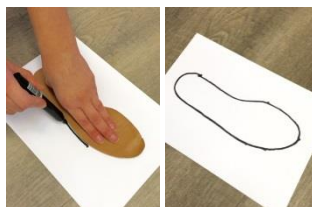

Im Anschluss schreiben Sie uns bitte noch Ihre Schuhgröße dazu.



Zum Schluss legen Sie das Blatt mit Ihrer Zeichnung in den Trittschaum-Karton und kleben diesen zu. Den Karton können Sie dann einfach mit dem aufgeklebten Retourenschein bei der nächsten Postfiliale abgeben.



Sobald Ihr Trittschaumpaket bei uns eingegangen ist, fertigen wir Ihre gewünschten orthopädischen Maßeinlagen mit großer Sorgfalt an und senden sie Ihnen innerhalb einer Woche zu. Sie erhalten von uns eine Versandbestätigung per email.

